

一次性使用输血管路及附件

产品型号: 903-00018P: 大容量储液槽

包装规格: 1 套/包装


预期用途: 本型号产品用于替换或附加于 903-00006P (一次性使用输血通用管路)。与 Belmont FMS2000 加温快速输注系统配套使用,用于外科大量失血、创伤以及各种需要快速输注和加温血液或液体的情况。

灭菌方式: 产品采用环氧乙烷灭菌。产品无菌,无热原。

主要组成部分: 大容量储液槽由 160 微米过滤器、瓶塞穿刺器、供液管、3 升储液槽以及连接管路组成。

安装使用说明:

- (1) 利用无菌操作技术断开螺旋接头,从 903-00006P (一次性使用输血通用管路) 上断开原有标准储液槽。
 - 按进螺旋锁片并拉出接头,断开较粗的泵管路。
 - 旋开接头,断开较细的回流管路。
- (2) 将大容量储液槽通过大托架置于静脉输液架上。
- (3) 将大容量储液槽下部的管路与 903-00006 (一次性使用输血通用管路) 连接。
- (4) 利用无菌操作技术将三根瓶塞穿刺器供液管固定到储液槽顶部,组装好大容量储液槽。
- (5) 调节储液槽支架,确认储液槽底部的两根连接管路没有被拉紧或扭结。

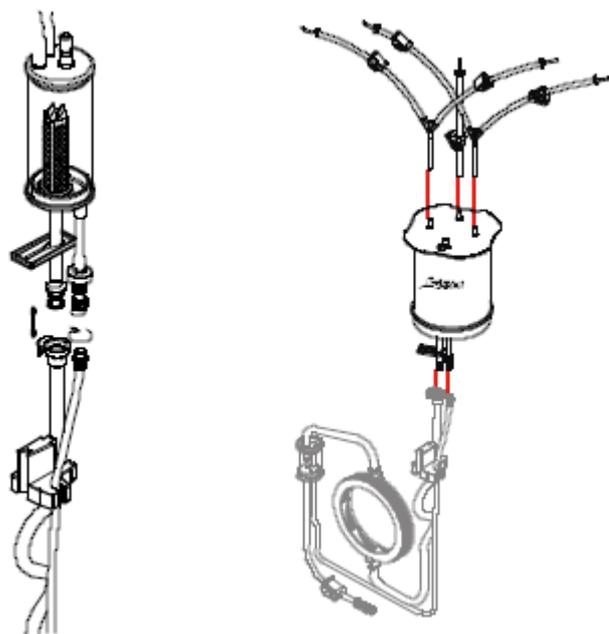

- 注意事项:**
1. 本产品仅用于 903-00006P (一次性使用输血通用管路)。
 2. 如果封盖不在正确位置请不要使用。
 3. 本产品为无菌,无热源一次性使用产品。

4. 使用后的产品请焚化处理。
5. 产品使用必须符合医疗部门相关操作规范及相关法规的要求，仅限于经培训的医生或护理人员使用。
6. 在输注前病人管路必须完全清除气泡（使用手册安装说明第 10 步）。
7. 不要将乳酸林格氏溶液或其他含钙的溶液与枸橼酸盐血溶液混合。
8. 不能用设备加热血小板，冻干血浆或粒细胞悬浮液。
9. 处理血液制品时要遵守标准预防措施。所有血液制品都视为已经感染，并立即清除所有溅出物。
10. 不要改变或更换一次性输血管路及附件的任何部分。任何更换都将危及病人或损坏系统。
11. 安装和使用系统之前应当参考操作手册中的完整说明。
12. 不要对大容量储液槽施加压力。
13. 根据美国血库联合会技术手册，大容量储液器最长使用合理时限为 4 小时。
14. 本产品不能用于药品输注。

- 储运条件：**
1. 保存在远离化学气体暴露的空间
 2. 湿度：15%—70%
 3. 温度：-20℃（-4°F）— 50℃（122°F）

CE 0843

图示符号解释说明：




: 无菌产品，环氧乙烷灭菌




: 一次性使用产品



: 注意，请参考产品使用说明书

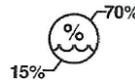

: 湿度范围：15%—70%

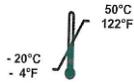

: 温度范围：-20℃（-4°F）— 50℃（122°F）



如果包装损坏请勿使用

批号：

生产日期：

使用期限：三年

失效日期：

医疗器械注册证书号：国械注进 20153663332

产品技术要求编号：国械注进 20153663332

生产企业：BELMONT INSTRUMENT CORPORATION

注册地址及生产地址：780 Boston Road, Billerica, MA, 01821, USA

联系方式：01-978-663-0212

ISO 13485：11183610.PDWS

中国代理及售后服务机构：湖南省新程湘绣进出口有限公司

地址：长沙市芙蓉区建湘路 521 号轻工大楼 2 楼 邮政编码：410005

联系电话：0731-82222477 免费热线：800-878-6375

修改日期：2015 年 11 月 1 日

版本 B