


OPERAÇÃO PASSO A PASSO DO ALLON®: Modo de normotermia (padrão)

Indicação de uso: Manter a temperatura corporal predefinida conforme determinado pelo médico. Manter a temperatura corporal normal durante procedimentos cirúrgicos em pacientes adultos e pediátricos.


1. Instalação

1.	Coloque a unidade Allon no local desejado e trave as rodas dianteiras.
2.	Preencha o reservatório de água de modo que o nível esteja entre as duas linhas vermelhas, use somente água estéril ou filtrada da torneira a 0,22 micron.
3.	Coloque o ThermoWrap® apropriado na mesa de cirurgia (<i>Consulte as Instruções de uso do ThermoWrap</i>).
4.	Conecte os tubos de água ao ThermoWrap e ao dispositivo Allon, ouvindo o som de um clique à medida que cada tubo é conectado. Certifique-se de que as pinças no ThermoWrap estejam abertas.
5.	LIGUE o dispositivo Allon. Um autoteste completo é realizado.
6.	O pré-aquecimento da água é realizado automaticamente após o autoteste.
7.	Depois de concluído, o sistema começa automaticamente a fluir água aquecida para o ThermoWrap.
8.	Você pode selecionar a temperatura de ponto de ajuste (ponto de ajuste padrão = 37,0 °C no modo de normotermia) ou selecionar a temperatura de saída de água no modo manual (padrão = 38,5 °C) usando a tecla de ponto de ajuste.

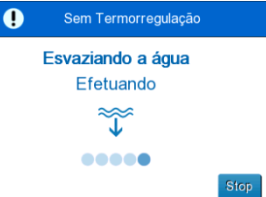

2. Aquecimento

1.	Posicione o paciente no ThermoWrap (após o envoltório ter sido preenchido com água). Consulte as instruções de uso do ThermoWrap.	
2.	Conecte o cabo Core (Corporal) ao soquete Core (Corporal) à direita e o cabo Surface (Superficial) ao soquete Surface (Superficial) à esquerda do sistema, correspondendo as cores, cinza com cinza e verde com verde e, em seguida, conecte as sondas de temperatura aos cabos adaptadores apropriados.	
3.	Insira a sonda Core (Corporal) no paciente e acople a sonda Surface (Superficial) na pele do paciente.	
4.	Fixe o ThermoWrap no paciente.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> No modo de Normotermia, a temperatura do paciente agora é regulada pelo Allon, conforme definido pelo médico. No modo Manual, a temperatura do paciente agora é regulada pelo Allon, conforme definido pelo médico. 	

*Este documento não substitui a necessidade de ler todo o Manual do Usuário Allon.

3. Resfriamento		
1.	Ao resfriar o paciente, o Allon deve ser colocado no modo de espera.	
2.	Selecione EM ESPERA no Menu e mantenha este modo até que o médico queira que a máquina aqueça.	
3.	Para retomar o aquecimento com Allon, selecione OPERAR no Menu.	

4. Desconexão	
1.	Troque para o modo Em Espera e aguarde alguns segundos.
2.	Prenda os conectores firmemente no ThermoWrap e remova o envoltório e as sondas do paciente.
3.	Desconecte o ThermoWrap do Allon.
4.	Descarte o ThermoWrap e as sondas descartáveis.

5. Cuidado após o uso: Diretrizes de limpeza e desinfecção		
1.	Coloque comprimidos ou pó de dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) no reservatório de água, de acordo com as recomendações do fabricante de NaDCC, e deixe a máquina funcionando durante 30 minutos, no modo de espera.	
2.	Esvazie o reservatório de água: Selecione Esvaziar no menu Serviços (consulte o Manual do Usuário para obter instruções). O Allon alertará você quando o reservatório estiver vazio. Para uso frequente (3 a 4 vezes por semana): Drene a água uma vez por semana. Para uso não frequente: Drene a água após cada uso.	
3.	Limpe e desinfete a máquina e os acessórios de acordo com o protocolo do hospital. Use lenços de desinfecção padrão ao desinfetar as superfícies externas do sistema Allon, incluindo todos os cabos de temperatura, conexões de água e conectores.	

6. Você sabia?	
1.	A utilização do ThermoWrap NÃO substitui as diretrizes de prática comum para prevenir úlceras de pressão. Continue usando medidas preventivas padrão de úlceras de pressão ao usar o ThermoWrap.
2.	Um ThermoWrap NÃO deve ser usado como uma ferramenta para levantar ou mover o paciente.
3.	Evite o acúmulo de fluidos entre a pele e o ThermoWrap.

*Este documento não substitui a necessidade de ler todo o Manual do Usuário Allon.