


**ALLON® ADIM ADIM ÇALIŞTIRMA: Normotermi Modu (Varsayılan)**

Kullanım endikasyonu: Hekimin belirlediği önceden ayarlanmış vücut sıcaklığını idame ettirmek. Yetişkin ve pediyatrik hastalarda cerrahi işlemler sırasında normal vücut sıcaklıklarını idame ettirmek.

**1. Kurulum**

1.	Allon üniteyi istenen konuma yerleştirin ve ön tekerlekleri kilitleyin.
2.	Su deposunu iki kırmızı çizginin arasındaki seviyeye kadar yalnızca <b>steril su veya 0,22 mikron filtrelenmiş çeşme suyuyla doldurun.</b>
3.	Uygun ThermoWrap®'i ameliyat masasına koyun ( <i>ThermoWrap'in kullanma talimatına bakın</i> )
4.	Su hortumlarını her bir hortum bağlandığında klik sesini duyarak ThermoWrap'e ve Allon cihaza bağlayın. ThermoWrap'teki tüm klemplerin açık olduğundan emin olun.
5.	Allon cihazı <b>AÇIN</b> . Tam otomatik test gerçekleştirilir.
6.	Su ön ısıtma, otomatik testten sonra otomatik olarak gerçekleştirilir.
7.	Tamandıktan sonra sistem, otomatik olarak ThermoWrap'e sıcak su akışını başlatır.
8.	Ayar noktası düğmesiyle ayar noktası sıcaklığını (Normotermi modunda varsayılan ayar noktası = 37,0 °C) veya Manuel modunda su çıkış sıcaklığını (varsayılan = 38,5 °C) seçebilirsiniz.

**2. Isıtma**

1.	Hastayı ThermoWrap'in üstüne konumlandırın (sargı suyla dolduktan sonra).ThermoWrap'in kullanma talimatına bakın.	
2.	Gri-gri ve yeşil-yeşil olacak şekilde renkleri eşleştirerek <b>Core</b> (İç) kablosunu sistemin sağındaki <b>Core</b> (İç) soketine ve <b>Surface</b> (Yüzey) kablosunu sistemin solundaki <b>Surface</b> (Yüzey) soketine bağlayın ve ardından sıcaklık problemlerini uygun adaptör kablolarına takın.	
3.	<b>Core</b> (İç) probunu hastanın içine ve <b>Surface</b> (Yüzey) probunu hastanın cildine takın.	
4.	ThermoWrap'i hastanın üstüne sabitleyin.	
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normotermi modunda hastanın sıcaklığını artık hekimin ayarına göre Allon regüle eder.</li><li>• Manuel modunda suyun sıcaklığını artık hekimin ayarına göre Allon regüle eder.</li></ul>	


\*Bu belge, Allon'un kullanım kılavuzunun tamamını okuma gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

3. Soğutma	
1.	Hastayı soğuturken Allon, Bekleme moduna geçirilmelidir.
2.	Menüden <b>BEKLEME</b> ögesini seçin ve klinisyen makinenin ısıtmasını isteyene kadar bu modda kalın.
3.	Allon'la ısıtmaya devam etmek için menüden <b>ÇALIŞTIR</b> ögesini seçin.



4. Ayırma	
1.	Bekleme moduna geçin ve birkaç saniye bekleyin.
2.	Konnektörleri ThermoWrap'e sıkı bir şekilde klempleyin, hastanın sargısını açın ve problemleri hastadan çıkarın.
3.	ThermoWrap'i Allon'dan ayırın.
4.	ThermoWrap'i ve tek kullanımlık problemleri atın.

5. Kullanım Sonrası Bakım: Temizlik ve Dezenfeksiyon Kılavuzları	
1.	NaDCC üreticisinin önerilerine göre su deposuna sodyum dikloroizosiyanürat (NaDCC) tablet veya tozu ekleyin ve 30 dakika boyunca Bekleme modunda çalıştırın.
2.	Su deposunu boşaltın: Servisler menüsünden <b>Boşaltma</b> ögesini seçin (talimat için kullanım kılavuzuna bakın). Allon, depo boşaldığında sizi uyarır. <b>Sık kullanım (haftada 3-4 kez) için:</b> Suyu haftada bir kez drene edin. <b>Nadir kullanım için:</b> Suyu her kullanımdan sonra drene edin.
3.	Makine ve aksesuarları hastane protokolü uyarınca temizleyin ve dezenfekte edin. Tüm sıcaklık kabloları, su bağlantıları ve konnektörler dahil olmak üzere Allon sistemin harici yüzeylerini standart dezenfeksiyon mendilleriyle dezenfekte edin.

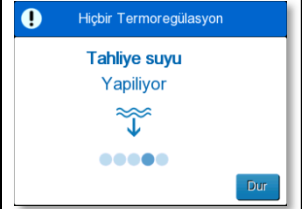

6. Biliyor muydunuz?	
1.	ThermoWrap kullanımı, bası yaralarını önlemeye yönelik yaygın pratik kılavuzlarının <b>YERİNE GEÇMEZ</b> . ThermoWrap'i kullanırken standart bası yarası önleme tedbirlerini kullanmaya devam edin.
2.	ThermoWrap, hastayı kaldırmaya veya hareket ettirmeye yönelik bir araç olarak <b>KULLANILMAMALIDIR</b> .
3.	Cilt ve ThermoWrap arasında sıvı birikmesinden kaçının.

\*Bu belge, Allon'un kullanım kılavuzunun tamamını okuma gerekliliğini ortadan kaldırmaz.