

ALLON® TRINN FOR TRINN: Normotermi-modus (standard)

Indikasjon for bruk: Opprettholde en forhåndsinnstilt kroppstemperatur fastsatt av legen. Opprettholde normale kroppstemperaturer under kirurgiske prosedyrer hos voksne og pediatriske pasienter.


1. OPPSETT

1. Plasser Allon-anordningen på ønsket sted og lås forhjulene.
2. Fyll vanntanken slik at nivået er mellom de to røde strekene. Bruk kun **sterilt eller 0,22 mikroners filtrert springvann**.
3. Plasser egnet ThermoWrap® på operasjonsbordet (*se bruksanvisningen for ThermoWrap*)
4. Koble vannslangene til ThermoWrap og til Allon-anordningen. Det høres et klikk når hver slange kobles til. Sørg for at klemmene på ThermoWrap er åpne.
5. Slå **PÅ** Allon-anordningen. Det utføres en fullstendig selvtest.
6. Forvarming av vannet utføres automatisk etter selvtesten.
7. Når forvarmingen er ferdig, begynner systemet automatisk å strøme varmt vann til ThermoWrap.




Du kan velge settpunkttemperaturen (standard settpunkt = 37,0 °C i normotermi-modus) eller velge vann ut-temperaturen i manuell modus (standard = 38,5 °C) med settpunktknappen.

9. Sikre at anordningens alarmer er slått **PÅ**. Hvis meldingen «Alle temperatursensoralarmer **AV**» vises på skjermen, følg disse trinnene for å slå på alarmene på nytt. Gå til **MENY**, velg **INNSTILLINGER**, angi passordet **6873**, velg «Temperatursensoralarmer» **PÅ**, trykk på **OK** for å bekrefte valget.

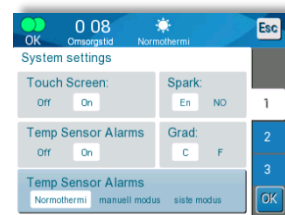

2. OPPVARMING

1. Plasser pasienten på ThermoWrap (etter at omslaget er fylt med vann). Se bruksanvisningen for ThermoWrap.
2. Koble **kjerne**-kabelen til **Centre**-kontakten på høyre side og **overflate**-kabelen til **Surface**-kontakten på venstre side av systemet ved å matche farger, grå til grå og grønn til grønn, og plugg deretter temperaturprobene i riktige adapterkabler.
3. Før **kjerne**-proben inn i pasienten og fest **overflate**-proben på pasientens hud.
4. Fest ThermoWrap på pasienten.
5.
 - I normotermi-modus reguleres nå pasientens temperatur av Allon som innstilt av legen.
 - I manuell modus reguleres nå vanntemperaturen av Allon som innstilt av legen.

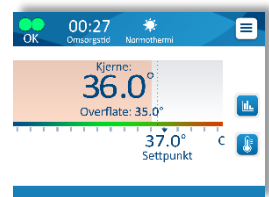

*Dette dokumentet erstatter ikke kravet om å lese hele brukerhåndboken til Allon.

3. KJØLING

1. Ved kjøling av pasienten skal Allon settes i standby-modus
2. Velg **STANDBY** fra menyen og behold denne modusen til legen ønsker at maskinen skal varme.
3. For å gjenoppta oppvarming med Allon velger du **BRUK** fra menyen



4. FRAKOBLING

1. Bytt til standby-modus og vent noen sekunder
2. Klem koblingene stramt på ThermoWrap og avdekk pasienten og fjern probene fra pasienten
3. Koble ThermoWrap fra Allon
4. Kast ThermoWrap og prober til engangsbruk

5. PLEIE ETTER BRUK: RETNINGSLINJER FOR RENGJØRING OG DESINFEKSJON

1. Dropp natriumdiklorisocyanurat (NaDCC)-tabletter eller -pulver i vanntanken i henhold til NaDCC-produsentens anbefalinger og kjør i 30 minutter i standby-modus.
2. Tøm vanntanken: Velg **Tøm** fra Service-menyen (se brukerhåndboken for instruksjoner). Allon varsler deg når tanken er tømt.
 - **For hyppig bruk (3-4 ganger i uken):** Én gang i uken skal vannet tømmes, og skyll med sterilt eller 0,22 mikron filtrert vann.
 - **For sjelden bruk:** Etter hver bruk skal vannet tømmes, og skyll med sterilt eller 0,22 mikron filtrert vann.
3. Rengjør og desinfiser maskinen og tilbehøret i henhold til sykehusets protokoll. Bruk standard desinfeksjonsvåtservietter ved desinfeksjon av eksterne overflater på Allon-systemet, inkludert alle temperaturkabler, vanntilkoblinger og koblinger, og hette, kjede og ankerring.



4. VISSTE DU AT?

1. Bruk av ThermoWrap erstatter **IKKE** retningslinjer for vanlig praksis for å hindre trykksår. Fortsett å bruke standard forebyggende tiltak for å hindre trykksår når du bruker ThermoWrap.
2. ThermoWrap skal **IKKE** brukes som et middel til å løfte eller flytte pasienten.
3. Unngå væskeansamling mellom huden og ThermoWrap.