

OPERAÇÃO PASSO A PASSO DO ALLON®: Modo de normotermia (Predefinido)

Indicação de uso: Manter a temperatura corporal predefinida, conforme determinado pelo médico.
Manter a temperatura corporal normal durante procedimentos cirúrgicos em pacientes adultos e pediátricos.

1. CONFIGURAÇÃO

1.	Coloque a unidade Allon no local desejado e trave as rodas da frente.
2.	Encha o depósito de água de forma que o nível se situe entre as duas linhas vermelhas utilizando apenas água da torneira filtrada a 0,22 micron ou esterilizada .
3.	Coloque o ThermoWrap® apropriado na mesa cirúrgica (<i>consulte as Instruções de uso do ThermoWrap</i>).
4.	Conecte os tubos de água ao ThermoWrap e ao dispositivo Allon. É possível ouvir um som de um clique à medida que cada tubo é conectado. Certifique-se de que os clampes no ThermoWrap estejam abertos.
5.	Ligue o dispositivo Allon. É realizado um autoteste completo.
6.	O pré-aquecimento da água é realizado automaticamente após o autoteste.
7.	Depois de concluído, o sistema começa automaticamente a fluir água morna para o ThermoWrap.
8.	 É possível selecionar a Temperatura do ponto definido (Ponto predefinido = 37,0°C no modo de Normotermia) ou a Temperatura da saída de água no Modo manual (Predefinição = 38,5°C) utilizando a tecla Definir ponto.
9.	Certifique-se de que os alarmes do dispositivo estejam ligados. Se houver uma mensagem na parte inferior da tela, "Alarmes de sensores temp. desligados", siga estas etapas para ativar novamente os alarmes. No Menu, selecione Settings, insira a senha 6873, selecione Ligado para "Temp Sensor Alarms" e pressione OK para confirmar a seleção.  

2. AQUECIMENTO

1.	Posicione o paciente no ThermoWrap (após o envolvimento ter sido preenchido com água). Consulte as Instruções de uso do ThermoWrap.	
2.	Conecte o cabo Interior à tomada Core localizada à direita e o cabo Superficial à tomada Surface localizada à esquerda do sistema, combinando as cores, cinza com cinza e verde com verde, depois conecte as sondas de temperatura nos devidos cabos adaptadores.	
3.	Insira a sonda Interior no paciente e prenda a sonda Superficial na pele do paciente.	
4.	Fixe o ThermoWrap no paciente.	
5.	- No Modo de normotermia, a temperatura do paciente agora é regulada pelo Allon conforme definido pelo médico. - No Modo manual, a temperatura da água agora é regulada pelo Allon conforme definido pelo médico.	

*Este documento não substitui a necessidade da leitura de todo o Manual do usuário Allon.

3. ARREFECIMENTO

1. Ao arrefecer o paciente, o Allon deve ser colocado no Modo de espera.
2. Selecione **Modo de espera** no Menu e mantenha esse modo até que o médico solicite o aquecimento do aparelho.
3. Para retomar o aquecimento com Allon, selecione **Funcionamento** no Menu.




4. DESCONEXÃO

1. Mude para o Modo de espera e aguarde alguns segundos.
2. Feche os conectores firmemente no ThermoWrap, desembrulhe o paciente e remova as sondas do paciente.
3. Desconecte o ThermoWrap do Allon.
4. Descarte o ThermoWrap e as sondas descartáveis.

5. CUIDADOS APÓS O USO: DIRETRIZES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

1. Coloque pastilhas ou pó de dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) no depósito de água, de acordo com as recomendações do fabricante do NaDCC, e deixe-o atuar por 30 minutos no Modo de espera.
2. Esvazie o depósito de água: Selecione **Esvaziar** no menu Serviços (consulte o Manual do usuário para obter instruções). O Allon irá alertá-lo quando o depósito estiver vazio.
 - **Em caso de uso frequente (3 a 4 vezes por semana):** Uma vez por semana, drene a água e enxágue com água filtrada a 0,22 micron ou esterilizada.
 - **Em caso de uso pouco frequente:** Após cada uso, drene a água e enxágue com água filtrada a 0,22 micron ou esterilizada.
3. Limpe e desinfete o aparelho e os acessórios de acordo com o protocolo do hospital. Utilize lenços de desinfecção padrão para desinfetar as superfícies externas do sistema Allon, incluindo todos os cabos de temperatura, conexões de água, conectores, tampa, corrente e conjunto do anel de ancoragem.

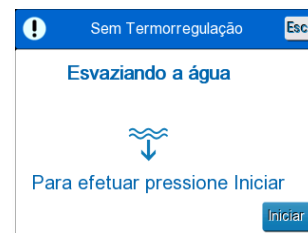

4. VOCÊ SABIA?

1. O uso do ThermoWrap **NÃO** substitui as diretrizes de práticas comuns para prevenção de úlceras por pressão. Continue executando as medidas preventivas padrão para úlceras por pressão quando utilizar o ThermoWrap.
2. O ThermoWrap **NÃO** deve ser utilizado como ferramenta para levantar ou mover o paciente.
3. Evite o acúmulo de fluidos entre a pele e o ThermoWrap.