


UTILIZAREA ALLON® PAS CU PAS: Modul de normotermie (implicit)

Indicații de utilizare: Mențineți temperatura corporală presetată, așa cum este stabilită de către medic. Mențineți temperatura corporală normală în timpul procedurilor chirurgicale la pacienții adulți, copii și adolescenți.


1. CONFIGURARE

- Așezați unitatea Allon în locul dorit și blocați roțile din față.
- Umpleți rezervorul de apă astfel încât nivelul să fie între cele două linii roșii; folosiți doar **apă sterilă sau apă potabilă filtrată la 0,22 microni**.
- Așezați dispozitivul ThermoWrap® corespunzător pe masa de operație (*consultați instrucțiunile de utilizare ale ThermoWrap*).
- Conectați tuburile de apă la dispozitivul ThermoWrap și la dispozitivul Allon; conectarea fiecărui tub este marcată de un clic audibil. Asigurați-vă că clemele de pe dispozitivul ThermoWrap sunt deschise.
- Porniți** dispozitivul Allon. Se efectuează un autotest complet.
- Preîncălzirea apei se efectuează automat după autotest.
- La finalizare, sistemul începe automat să furnizeze apă caldă către dispozitivul ThermoWrap.
- 

Puteți selecta temperatura punctului de referință (punctul de referință implicit = 37,0 °C în modul de normotermie) sau puteți selecta temperatura de ieșire a apei în modul manual (implicit = 38,5 °C) folosind tasta Punct de referință.
- Asigurați-vă că alarmele dispozitivului sunt **activate**. Dacă în partea de jos a ecranului apare mesajul „Toate alarmele senzorilor de temperatură **dezactivate**”, urmați acești pași pentru a reactiva alarmele. Accesați **MENU**, selectați **SETTINGS**, introduceți parola **6873**, selectați „Temp Sensor Alarms” **activate**, apăsați **OK** pentru a confirma selecția.

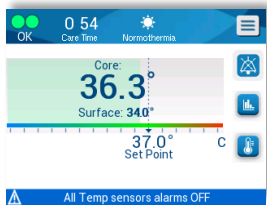



2. AVERTISMENT

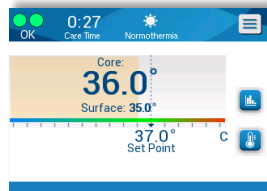- Poziționați pacientul pe dispozitivul ThermoWrap (după ce dispozitivul s-a umplut cu apă). Consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivul ThermoWrap.
 - Conectați cablul **central** la mufa **Core** din dreapta și cablul de **suprafață** la mufa de **Surface** din stânga sistemului, potrivit culorile, adică gri cu gri și verde cu verde, apoi conectați sondele de temperatură la cablurile adaptoare adecvate.
 - Introduceți sonda **centrală** în pacient și atașați sonda de **suprafață** pe pielea pacientului.
 - Fixați dispozitivul ThermoWrap pe pacient.
 - În modul de normotermie, temperatura pacientului este acum reglată de dispozitivul Allon, așa cum este stabilită de către medic.
 - În modul manual, temperatura apei este acum reglată de dispozitivul Allon, așa cum este stabilită de către medic.
- 


*Acest document nu înlocuiește obligația de a citi în întregime manualul de utilizare Allon.

3. RĂCIRE

1. La răcirea pacientului, dispozitivul Allon trebuie să fie comutat în modul de repaus.
2. Selectați **STANDBY** din meniu și păstrați acest mod până când medicul dorește ca aparatul să încălzească.
3. Pentru a relua încălzirea cu dispozitivul Allon, selectați **OPERATE** din meniu.

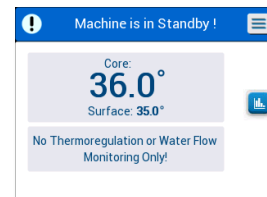


4. DECONECTARE

1. Treceți în modul de repaus și așteptați câteva secunde.
2. Strângeți conectorii pe dispozitivul ThermoWrap, dezveliți pacientul și scoateți sondele de la pacient.
3. Deconectați dispozitivul ThermoWrap de la dispozitivul Allon.
4. Înlăturați dispozitivul ThermoWrap și sondele de unică folosință.

5. ÎNGRIJIREA DUPĂ UTILIZARE: INDICAȚII DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE

1. Puneți comprimate sau pulbere de dicloroizocianurat de sodiu (NaDCC) în rezervorul de apă conform recomandărilor producătorului de NaDCC și rulați timp de 30 de minute în modul de repaus.
2. Goliți rezervorul de apă: Selectați **Empty** din meniul de servicii (consultați Manualul de utilizare pentru instrucțiuni). Dispozitivul Allon vă va avertiza când rezervorul s-a golit.
 - **Pentru utilizare frecventă (3-4 ori pe săptămână):** O dată pe săptămână, scurgeți apa și clătiți cu apă sterilă sau filtrată la 0,22 microni.
 - **Pentru utilizare rară:** După fiecare utilizare, scurgeți apa și clătiți cu apă sterilă sau filtrată la 0,22 microni.
3. Curățați și dezinfectați aparatul și accesoriile conform protocolului spitalului. Utilizați șervețele dezinfectante standard când dezinfectați suprafețele externe ale sistemului Allon, inclusiv toate cablurile de temperatură, conexiunile și conectorii de apă, precum și ansamblul capac, lanț și inel de ancorare.

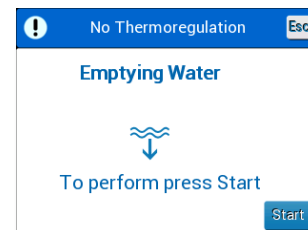

4. ȘTIAȚI CĂ?

1. Utilizarea dispozitivului ThermoWrap **NU** înlocuiește ghidurile de practică obișnuite pentru a preveni leziunile de decubit. Continuați să aplicați măsurile standard de prevenire a leziunilor de decubit atunci când utilizați dispozitivul ThermoWrap.
2. Un dispozitiv ThermoWrap **NU** trebuie folosit ca instrument pentru ridicarea sau mutarea pacientului.
3. Evitați acumularea de lichide între piele și dispozitivul ThermoWrap.