

INSTRUKSJONER FOR DESINFEKSJON AV ALLON® VANNKRETSLØP

1. NØDVENDIG DESINFEKSJONSUTSTYR				
A.	Allon® desinfeksjonssett (delenr. 405-00024) inneholder:			
	Omløpsslange med 2 kontakter		Delenr. 200-00181	
	Temperatursimulator		Delenr. 017-00245	
B.	PVU (personlig verneutstyr) i henhold til instruksjonene fra produsenten av NaDCC-tabletten.			
C.				Tabletter med anbefalt konsentrasjon av natriumdiklorisocyanurat (NaDCC) (som angitt i tabell 1)
D.	Desinfeksjonsservietter godkjent for teknisk bruk på sykehus			
E.	Sterilt vann / 0,22 µm filtrert vann (ca. 12 liter totalt) MERK: Ikke bruk avionisert vann eller vann som lages gjennom omvendt osmose, da det kan føre til korrosjon av systemets metallkomponenter.			

2. DESINFEKSJONS-FREKVENNS
Før første gangs bruk
Minst én gang hver tredje måned
Før langtidslagring (>3 måneder)
Før bruk etter langtidslagring (>3 måneder)

MERK: Desinfeksjon kan utføres oftere hvis sykehusets prosedyrer tilsier det.

MERK: Hvis en pasient, kliniker eller biomateriale kommer i kontakt med vannkretsen, desinfiser umiddelbart etterpå.

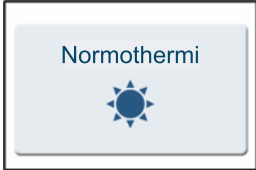
Tabell 1

Tabletter som trengs for å oppnå en NaDCC-konsentrasjon på minst 5382 ppm

PurTabs® (13,1 g)	Klorsept® 87 (17,4 g)	Aquatabs® (8,68 g)
8 tabletter per 6 liter vann	7 tabletter per 6 liter vann	7 tabletter per 6 liter vann

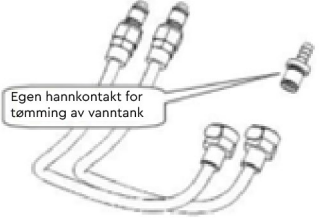
3. KLARGJØRING OG DESINFEKSJON AV ENHETEN

A.		Kontroller at enheten er slått AV . Sjekk nivået i vanntanken. Hvis vannivået er under den nederste røde streken, må det tilsettes romtemperert sterilt eller 0,22 µm filtrert vann til vannivået ligger mellom de 2 røde pilene, for å sikre at maskinen har 6 liter . MERK: Alternativt kan desinfeksjonsløsningen lages i en separat beholder i henhold til instruksjonene fra produsenten av NaDCC-tabletten.
B.	PVU påkrevd	Bruk passende PVU i henhold til instruksjonene fra produsenten av NaDCC-tabletten.

	Tilsett NaDCC	Fjern hetten, kjedet og ankerringen fra enhetens vanntank. Finn frem NaDCC-tablettene som skal brukes, og tilsett riktig antall i enhetens vanntank i henhold til tabell 1 . MERK: Ikke desinfiser i nærheten av behandlingsområdet.	
C.	   La tablettene løse seg opp i 15 minutter. Mens tablettene løser seg opp utføres resten av trinnene i punkt C. MERK: Ikke la den oppløste tablettløsningen være i enhetens vanntank i mer enn 20 minutter.		
	2 kontakter	Rengjør hetten, kjedet og ankerringen med desinfeksjonsservietter som er godkjent for teknisk bruk på sykehus, og sett deretter hetten, kjedet og ankerringen på igjen.	
	Delenr. 200-00181 	Koble de blå slangene (delenr. 200-00109) til omløpsslangesettet med 2 kontakter (delenr. 200-00181). Koble de andre endene av de blå slangene til enheten.	
D.	Koble til enheten, slå den PÅ , og vent til selvtesten er fullført.		
E.		Velg og la enheten kjøre i Normothermi-modus. Angi pasientsettpunktet til 37 °C.	
F.		Sett temperatursimulatoren (delenr. 017-00245) inn i kjernetemperaturkontakten på forsiden av enheten, og still den inn på 36,0 °C ±0,3 ved å vri på hendelen og følge med på skjermen.	
G.		La løsningen sirkulere i 5 minutter (minst) til 6 minutter (maksimalt) for å desinfisere enhetens vannkretsløp . Sett enheten i Standby-modus når prosedyren er fullført.	
H.	Fjern omløpsslangesettet fra det tilkoblede blå slangesettet. Tøm løsningen fra enhetens vanntank som beskrevet i tabell 2 . Kast rengjøringsløsningen i henhold til sykehusets prosedyrer.		
I.	Skyllesyklus	Fortsett med del 4 «Skyllesyklus» for å fullføre desinfeksjons- og rengjøringsprosedyren.	

Tabell 2

TØMMING AV VANNTANKEN

A.	HVIS ET OMSLAG ER TILKOBLET: Klem omslaget stramt i et område unna stedet der pasienten behandles, med systemet avslått, og koble deretter omslaget fra tilkoblingsvannslangene. Kast omslaget.	
B.		Koble en hann-dreneringskontakt til « vann ut »-siden på tilkoblingsvannslangene og før slangen til en beholder eller vask for vannoppsamling. (se bilde i trinn E i tabell 2) MERK: Kast rengjøringsløsningen i henhold til sykehusets prosedyrer. Slå systemet PÅ .
C.		Velg Tom på hovedskjermbildet eller naviger til Tom ved å trykke på Meny -ikonet  og deretter velge Service og deretter Tom .
D.		Trykk på OK . Følgende skjermbilde vises. Trykk på Start når du er klar til å begynne prosessen.
E.		Hvis feilmeldingen «Tilkoble vannrør» vises, indikerer det at hann-dreneringskontakten er koblet til vann inn, og ikke vann ut.  Vann ut-kontakten indikeres av den grå indikatoren med en pil som peker ned.
	For å løse dette, trykk på Esc på skjermen. Koble fra hver tilkoblingsvannslange i maskinenden, og koble deretter til igjen på motsatt måte. Nå skal hann-dreneringskontakten være koblet til slangen som er satt inn i vann ut . Når du er ferdig, følger du de foregående trinnene én gang til for å fortsette tømningen. Når vannet er helt tømt, vises det en melding som forteller at enheten nå er tom.	

4. SKYLLESYKLUS

MERK: Enheten **MÅ** skylles. Hvis enheten ikke skylles, kan det oppstå skade på enhetens innvendige komponenter.

A.		Fyll opp enheten med 6 liter sterilt eller 0,22 µm filtrert vann (uten NaDCC).	
B.		Koble riktig omløpsslangesett til de blå slangene som fortsatt er koblet til enheten.	
C.			Sett enheten i nNormothermi-modus igjen, og la temperatursimulatoren fortsatt stå på 36,0 °C ±0,3. La vannet sirkulere i minst 5 minutter før enheten settes i Standby-modus.
D.	Fjern omløpsslangesettet fra det tilkoblede blå slangesettet. Tøm løsningen fra enhetens vanntank som beskrevet i tabell 2 . Fyll enheten med 6 liter romtemperert sterilt eller 0,22 µm filtrert vann hvis enheten skal tas i bruk igjen , eller la tanken være tom hvis den skal settes på lager .		
E.	Slå enheten AV , ta ut støpselet og koble fra de blå slangene. Koble fra og sett temperatursimulatoren (delenr. 017-00245) til lagring.		

ENHETEN ER NÅ KLAR TIL LAGRING ELLER NESTE PASIENT

MERK: Dette dokumentet erstatter ikke kravet om å lese hele brukerhåndboken for enheten. Se enhetens brukerhåndbok for fullstendige instruksjoner om drift, vedlikehold og rengjøring.



TEKNISK BRUKERSTØTTE

USA: 855.397.4547

GLOBALT: +1.978.663.0212

TECHSUPPORT@BELMONTMEDTECH.COM

WWW.BELMONTMEDTECH.COM