

ALLON®-VEJLEDNING TRIN-FOR-TRIN: Normotermi-tilstand (standardindstilling)

Indikation for brug: Oprethold forudindstillet kropstemperatur som bestemt af lægen. Oprethold normale kropstemperaturer under kirurgiske procedurer hos voksne og pædiatriske patienter.



1. OPSÆTNING

1. Anbring Allon-enheden på den ønskede placering, og lås de forreste hjul.
2. Fyld vandtanken, så niveauet er mellem de to røde linjer, anvend kun **sterilt eller 0,22 mikron filtreret vand fra hanen**.
3. Anbring den passende ThermoWrap® på operationsbordet (*se brugsvejledningen til ThermoWrap*)
4. Slut vandslangerne til ThermoWrap og til Allon-enheden, og lyt efter en kliklyd der opstår, når hver slange tilsluttes. Sørg for, at klemmerne på ThermoWrap er åbne.
5. **TÆND** for Allon-enheden. En komplet selvtest udføres.
6. Forvarmning af vandet udføres automatisk efter selvtesten.
7. Når dette er afsluttet, begynder systemet automatisk at tilføre varmt vand til ThermoWrap.




Du kan vælge sætpunkttemperaturen (standard-sætpunkt = 37,0 °C i normotermi-tilstand) eller vælge vandudløbstemperaturen i manuel tilstand (standard = 38,5 °C) ved hjælp af Sætpunkt-tasten.

9. Sørg for, at enhedens alarmer er **TÆNDT**. Hvis der er en meddelelse nederst på skærmen, hvor der står "Alle temp sensorer alarmer **FRA**", skal du følge disse trin for at slå alarmerne til igen. Gå til **MENU**, vælg **INDSTILLINGER**, indtast adgangskoden **6873**, vælg "Temp sensorer alarmer" **TIL**, og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

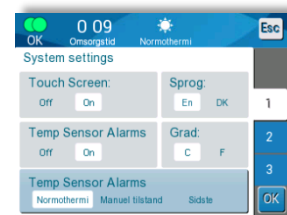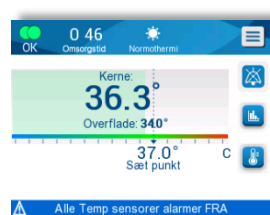

2. OPVARMNING

1. Anbring patienten på ThermoWrap (efter omslaget er fyldt med vand). Se brugsanvisningen til ThermoWrap.
2. Slut **kerne**-kablet til **Core**-stikkontakten på højre side og **overflade**-kablet til **Surface**-stikkontakten på venstre side af systemet, således at farverne matcher, grå til grå og grøn til grøn, og sæt derefter temperatursonderne i de tilsvarende adapterkabler.
3. Indfør **kerne**-sonden i patienten, og fastgør **overflade**-sonden på patientens hud.
4. Sikr ThermoWrap på patienten.
5.
 - I normotermi-tilstand reguleres patientens temperatur nu af Allon, som indstillet af lægen.
 - I manuel tilstand reguleres vandtemperaturen nu af Allon, som indstillet af lægen.

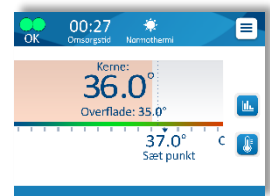

*Dette dokument erstatter ikke kravet om at læse hele brugermanualen til Allon.

3. AFKØLING

1. Når patienten afkøles, skal Allon sættes i standby-tilstand.
2. Vælg **STANDBY** fra menuen, og behold denne tilstand, indtil klinikerens ønsker, at maskinen skal varme.
3. For at forsætte opvarmning med Allon skal du vælge **BETJEN** fra menuen.



4. FRAKOBLING

1. Skift til standby-tilstand, og vent et par sekunder.
2. Klem tilslutningerne på ThermoWrap tæt sammen, og pak patienten ud, og fjern sonderne fra patienten.
3. Afkobl ThermoWrap fra Allon.
4. Kassér ThermoWrap og engangssonder.

5. PLEJE AF SYSTEMET EFTER BRUG: RETNINGSLINJER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION

1. Kom natriumdichloroisocyanurat (NaDCC)-tabletter eller pulver i vandtanken i henhold til NaDCC-producentens anbefalinger, og kød 30 minutter i standby-tilstand.
2. Tøm vandtanken: Vælg **Tøm** i menuen Tjenester (se instruktioner i brugermanualen). Allon advarer dig, når beholderen er tømt.
 - **For hyppig brug (3-4 gange om ugen):** Én gang om ugen skal du dræne vandet og skylle med sterilt eller 0,22 mikron filtreret vand.
 - **For sjælden brug:** Efter hver brug skal du dræne vandet og skylle med sterilt eller 0,22 mikron filtreret vand.
3. Rengør og desinficer maskinen og tilbehøret i henhold til hospitalets protokoller. Brug almindelige desinfektionsservietter, når du desinficerer Allon-systemets ydre overflader, inklusive alle temperaturkabler, vandtilslutninger og tilslutninger samt hættens, kæden og ankerringenheden.



4. VIDSTE DU?

1. Brug af ThermoWrap erstatter **IKKE** almene retningslinjer for forhindring af tryksår. Fortsæt med at tage almene foranstaltninger til forebyggelse af tryksår, når du bruger ThermoWrap.
2. ThermoWrap må **IKKE** bruges som et værktøj til at løfte eller flytte patienten.
3. Undgå ophobning af væske mellem huden og ThermoWrap.