


ALLON®-JÄRJESTELMÄN VAIHEITTAINEN KÄYTTÖ: Normaalilämpötila (oletus)

Käyttöaihe: Ylläpitää lääkärin määräämää esiasetettua kehon lämpötilaa. Ylläpitää aikuis- ja lapsipotilaiden normaalia kehon lämpötilaa leikkaustoimenpiteiden aikana.

1. VALMISTELU



- Aseta Allon-järjestelmä haluttuun sijaintipaikkaan ja lukitse etupyörät.
- Täytä vesisäiliö siten, että veden taso on kahden punaisen viivan välissä ja käytä vain **steriiliä tai 0,22 mikronin suodattimella suodatettua vesijohtovettä**.
- Aseta asianmukainen ThermoWrap®-kääre leikkauspöydälle (*lisätietoa ThermoWrap-kääreen käyttöohjeissa*).
- Kiinnitä vesiletkut ThermoWrap-kääreeseen ja Allon-järjestelmään. Kuuntele napsahdusta jokaisen letkun kiinnittämisen yhteydessä. Varmista, että ThermoWrap-kääreen puristimet ovat auki.
- Kytke Allon-järjestelmä **PÄÄLLE**. Järjestelmä tekee täydellisen itsetestin.
- Itsetestin jälkeen vesi esilämmitetään automaattisesti.
- Kun se on tehty, järjestelmä käynnistää lämpimän veden virtauksen ThermoWrap-kääreeseen automaattisesti.
- 

Käyttäjä voi valita lämpöasetuksen (oletuslämpöasetus = 37,0 °C normaalilämpötilassa) tai poistoliittimen lämpötilan avulla manuaalililassa (oletus = 38,5 °C) lämpöasetusnäppäimellä.
- Varmista, että laitteen hälytykset ovat **PÄÄLLÄ**. Jos näytön alareunassa on viesti "Kaikki lämpötila-anturien hälytykset **POIS**", noudata näitä vaiheita ja ota hälytykset käyttöön. Siirry **VALIKKOON**, valitse **Asetukset**, syötä salasana **6873**, aseta Lämpötila-anturin hälytykset **PÄÄLLE** ja vahvista valinta lopuksi painamalla **OK**.

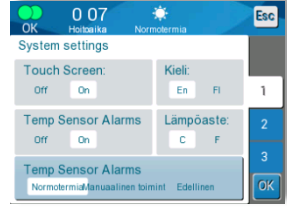2. LÄMMITYS

- Aseta potilas ThermoWrap-kääreelle (kun se on täyttynyt vedellä). Lisätietoa on ThermoWrap-kääreen käyttöohjeissa.
- Liitä **ydinkaapeli** oikealla olevaan **Core**-porttiin ja **pintakaapeli** järjestelmän vasemmalla puolella olevaan **Core**-porttiin. Liitä kaapeli samenvärisen porttiin, harmaa harmaaseen ja vihreä vihreään. Kytke sitten lämpötila-anturit asianmukaisiin sovitinkaapeleihin.
- Aseta **Core**-ydinanturi potilaaseen ja kiinnitä **Surface**-pinta-anturi potilaan iholle.
- Kiinnitä ThermoWrap-kääre potilaaseen.
- Normaalilämpötilassa Allon-järjestelmä säätelee nyt potilaan lämpötilaa lääkärin määräämän asetuksen mukaan.
 - Manuaalililassa Allon-järjestelmä säätelee nyt veden lämpötilaa lääkärin määräämän asetuksen mukaan.

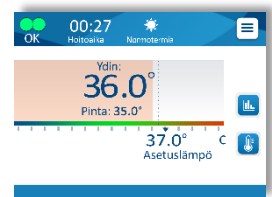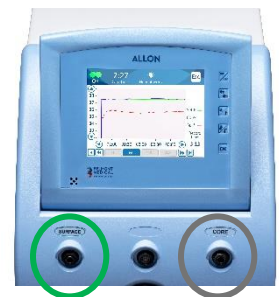

* Tämä asiakirja ei korvaa vaatimusta lukea Allon-järjestelmän käyttöopas kokonaisuudessaan.

3. JÄÄHDYTYS

1. Kun potilasta jäähdytetään, Allon-järjestelmä on siirrettävä valmiustilaan.
2. Valitse valikosta **VALMIUS** ja pidä laite tässä tilassa, kunnes hoitohenkilö haluaa, että järjestelmä lämmittää.
3. Kun lämmittämistä Allon-järjestelmällä halutaan jatkaa, valitse valikosta **KÄYTÄ**.




4. IRROTTAMINEN

1. Siirry valmiustilaan ja odota muutama sekunti.
2. Purista ThermoWrap-kääreen liittimet kunnolla kiinni, poista kääre potilaalta ja irrota anturit potilaasta.
3. Kytke ThermoWrap-kääre irti Allon-järjestelmästä.
4. Hävitä ThermoWrap-kääre ja kertakäyttöiset anturit.

5. KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO: PUHDISTUS- JA DESINFIOINTIOHJEET

1. Pudota natriumdikloori-isosyanuraattitabletteja tai -jauhetta (NaDCC) vesisäiliöön NaDCC:n valmistajan suositusten mukaisesti ja anna käydä 30 minuuttia valmiustilassa.
2. Tyhjennä vesisäiliö: Valitse palveluvalikosta **Tyhjennys** (lisäohjeet käyttöoppaassa). Allon-järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle, kun säiliö on tyhjentynyt.
 - **Usein tapahtuva käyttö (3-4 kertaa viikossa):** Poista vesi kerran viikossa ja huuhtelee steriilillä tai 0,22 mikronin suodattimella suodatetulla vedellä.
 - **Harvoin tapahtuva käyttö:** Poista vesi jokaisen käyttökerran jälkeen huuhtelee steriilillä tai 0,22 mikronin suodattimella suodatetulla vedellä.
3. Puhdista ja desinfioi järjestelmä ja lisävarusteet sairaalan menettelytavan mukaan. Käytä vakiomallisia desinfiointipyyhkeitä Allon-järjestelmän ulkopintojen desinfiointiin, mukaan lukien kaikki lämpötilakaapelit, vesiliitännät ja liittimet sekä korkki, ketju ja ankkurirengaskokoonpano.

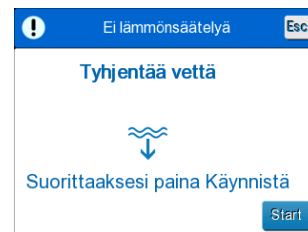

4. TIESITKÖ?

1. ThermoWrap-kääreen käyttö **EI** korvaa yleisiä painehaavojen estämistä koskevia menettelyohjeita. ThermoWrap-käärettä käytettäessä on jatkettava tavanomaisia painehaavojen estämismenetelmiä.
2. ThermoWrap-käärettä **EI** saa käyttää työvälineenä potilaan nostamiseen tai siirtämiseen.
3. Nesteen kertymistä ihon ja ThermoWrap-kääreen väliin on vältettävä.