




ALLON® LÉPÉSENKÉNTI ÚTMUTATÓ: Normothermia üzemmód (alapértelmezett)

Használati utasítás: Fenntartja az orvos által megállapított, előre beállított testhőmérsékletet. Fenntartja a normál testhőmérsékleteket műtéti eljárások során felnőtt és gyermek betegeken.

1. BEÁLLÍTÁS

1.	Tegye az Allon egységet a kívánt helyre, és rögzítse az elülső kerekeket.
2.	Töltse fel a víztartályt kizárólag steril vagy 0,22 mikron szűrt csapvízzel annyira, hogy a szint a két piros vonal között legyen.
3.	Helyezzen megfelelő ThermoWrap® takarót a műtőasztalra (Lásd: a ThermoWrap használati utasítása).
4.	Csatlakoztasson vízcöveket a ThermoWrap takaróhoz és az Allon eszközhöz, és közben figyelje a kattánást az egyes csövek csatlakozásakor. Ügyeljen arra, hogy a ThermoWrap takarón nyitva legyenek a kapcsok.
5.	Kapcsolja ON állásba az Allon eszközt. Teljes önteszt megy végbe.
6.	A víz előmelegítése automatikusan követi az öntesztet.
7.	Ennek befejezésekor a rendszer automatikusan elkezd meleg vizet áramoltatni a ThermoWrap takaróhoz.
8.	 Kiválaszthatja a hőmérsékleti alapértéket (alapértelmezett alapérték = 37,0 °C a normothermia üzemmódban), vagy kiválaszthatja a vízkifolyási hőmérsékletet a manuális üzemmódban (alapértelmezett érték = 38,5 °C) a Set Point gomb használatával.


2. MELEGÍTÉS

1.	Helyezze a beteget a ThermoWrap takaróra (miután a takaró megtelt vízzel). Lásd a ThermoWrap használati utasítását.	
2.	Csatlakoztassa a Core kábelt a jobb oldali Core aljzathoz, a Surface kábelt pedig a rendszer bal oldalán található Surface aljzathoz, egyeztetve a színeket, a szűrket a szűrkével, a zöldet pedig a zölddel, majd dugaszolja a hőmérséklet-érzékelőket a megfelelő adapterkábelekbe.	
3.	Helyezze a Core érzékelőt a betegbe, és rögzítse a Surface érzékelőt a beteg bőrén.	
4.	Biztosítsa a ThermoWrap takarót a betegen.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> Normothermia üzemmódban a beteg testhőmérsékletét ekkor az Allon eszköz szabályozza az orvos által beállított módon. Manuális üzemmódban a vízhőmérsékletet ekkor az Allon eszköz szabályozza az orvos által beállított módon. 	

*Ez a dokumentum nem helyettesíti azt az előírást, hogy az Allon eszköz használati utasítását végig kell olvasni.

3. HŰTÉS

1. A beteg hűtésekor az Allon eszközt készenlét üzemmódra kell átváltani.
2. Válassza ki a **STANDBY** lehetőséget a menüből, és ezt az üzemmódot tartsa fenn, amíg a klinikai személyzet melegíteni nem akarja a berendezést.
3. Az Allon eszközzel végzendő melegítés folytatásához válassza ki az **OPERATE** lehetőséget a menüből.

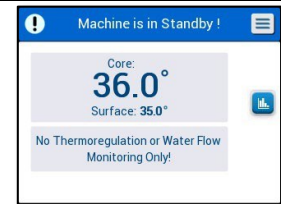

4. LEVÁLASZTÁS

1. Váltson a készenlét üzemmódra, és várjon néhány percig.
2. Rögzítse szorosan a csatlakozókat a ThermoWrap takarón, és takarja ki a beteget, távolítsa el az érzékelőket a betegről.
3. Válassza le a ThermoWrap takarót az Allon eszköztől.
4. Dobja ki a ThermoWrap takarót és az egyszer használatos érzékelőket.

5. HASZNÁLAT UTÁNI ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A külső felületek, a sapka, a lánc tisztításához és fertőtlenítéséhez olvassa el az Allon felhasználói kézikönyv 6. fejezetét (DDT-063-000).
2. A vízkör fertőtlenítésére vonatkozó utasítások az Allon felhasználói kézikönyv 6. fejezetében (DDT-063-000) vagy az Allon vízkörre vonatkozó fertőtlenítési utasításban (701-00744) találhatóak.

6. TUDTA?

1. A ThermoWrap használata **NEM** helyettesíti a felfekvések megelőzését célzó általános gyakorlati irányelveket. A megszokott, felfekvést megelőző intézkedéseket alkalmazza továbbra is a ThermoWrap használatakor.
2. A ThermoWrap takarót **NEM** szabad a beteg emeléséhez vagy mozgatásához használni.
3. Kerülje a folyadékok felgyülemelését a bőr és a ThermoWrap között.

