

ALLON® - FUNZIONAMENTO DETTAGLIATO: modalità di normotermia (predefinita)

Indicazione d'uso: mantenere una temperatura corporea predefinita secondo quanto stabilito dal medico. Mantenere le temperature corporee normali durante le procedure chirurgiche in pazienti adulti e pediatrici.

1. CONFIGURAZIONE:

1.	Posizionare l'unità Allon nell'area d'interesse e bloccare le rotelle anteriori.	
2.	Riempire il serbatoio dell'acqua in modo che il livello si trovi tra le due linee rosse utilizzando solo acqua sterile o di rubinetto filtrata a 0,22 micron .	
3.	Posizionare la fascia ThermoWrap® appropriata sul tavolo operatorio (<i>Vedere le istruzioni per l'uso della fascia ThermoWrap</i>).	
4.	Collegare i tubi dell'acqua alla fascia ThermoWrap e al dispositivo Allon, e verificare che venga emesso un clic quando ciascun tubo viene collegato. Assicurarsi che i morsetti posti sulla fascia ThermoWrap siano aperti.	
5.	Mettere il dispositivo Allon su ACCESO . Viene eseguito un autotest completo.	
6.	Dopo l'autotest viene eseguito automaticamente il preriscaldamento dell'acqua.	
7.	Al termine, il sistema inizia automaticamente a far scorrere l'acqua calda verso la fascia ThermoWrap.	
8.		È possibile selezionare la temperatura nominale (temperatura nominale predefinita = 37,0 °C in modalità di normotermia) o selezionare la temperatura di uscita dell'acqua nella modalità manuale (temperatura predefinita = 38,5 °C) utilizzando il tasto Temperatura nominale.
9.	Assicurarsi che gli allarmi del dispositivo siano su ACCESO . Se nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio "Tutti gli allarmi dei sensori di temperatura sono DISATTIVATI ", seguire questi passaggi per riattivarli. Andare su MENU , selezionare SETTINGS , inserire la password 6873 , selezionare "Temp Sensor Alarms" su ACCESO , premere OK per confermare la selezione.	 

2. RISCALDAMENTO

1.	Posizionare il paziente sulla fascia ThermoWrap (dopo che si è riempita di acqua) Vedere le istruzioni per l'uso della fascia ThermoWrap.	
2.	Collegare il cavo Nucleo alla presa Core a destra e il cavo Area alla presa Surface a sinistra del sistema facendo corrispondere i colori, il grigio con il grigio e il verde con il verde, quindi inserire le sonde di temperatura nei corrispondenti cavi adattatori.	
3.	Inserire la sonda Nucleo nel paziente e collegare la sonda Area alla cute del paziente.	
4.	Fissare la fascia ThermoWrap sul paziente.	
5.	- In modalità di normotermia, la temperatura del paziente è ora regolata dal dispositivo Allon come stabilito dal medico. - In modalità manuale, la temperatura dell'acqua è regolata dal dispositivo Allon come stabilito dal medico.	

*La lettura del presente documento non sostituisce il requisito di lettura dell'intero Manuale d'uso Allon.

3. RAFFREDDAMENTO

1. Quando si raffredda il paziente, il dispositivo Allon deve essere impostato nella modalità Standby.
2. Selezionare **STANDBY** dal menu e mantenere questa modalità fino a quando il medico desidera far riscaldare il dispositivo.
3. Per riprendere il riscaldamento con il dispositivo Allon, selezionare **AZIONA** dal menu.



4. DISCONNESSIONE

1. Passare alla modalità Standby e attendere alcuni secondi.
2. Chiudere bene i morsetti dei connettori sulla fascia ThermoWrap, togliere la fascia dal paziente e rimuovere le sonde dal paziente.
3. Scollegare la fascia ThermoWrap dal dispositivo Allon.
4. Gettare via la fascia ThermoWrap e le sonde monouso.

5. CURA DOPO L'USO: LINEE GUIDA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE

1. Versare dicloroisocianurato di sodio (NaDCC) in compresse o polvere nel serbatoio dell'acqua secondo le raccomandazioni del produttore di NaDCC e avviare un ciclo di 30 minuti del dispositivo in modalità Standby.
2. Per svuotare il serbatoio dell'acqua: selezionare **Vuoto** dal menu Servizi (vedere il Manuale d'uso per le istruzioni). Allon avviserà quando il serbatoio è vuoto.
 - **Per l'uso frequente (3-4 volte a settimana):** una volta alla settimana, scolare l'acqua e risciacquare con acqua sterile o filtrata a 0,22 micron.
 - **Per uso poco frequente:** dopo ogni uso, scolare l'acqua e risciacquare con acqua sterile o filtrata a 0,22 micron.
3. Pulire e disinfettare l'apparecchiatura e gli accessori secondo il protocollo ospedaliero. Utilizzare salviette disinfettanti standard durante la disinfezione delle superfici esterne del sistema Allon, inclusi tutti i cavi di temperatura, i collegamenti e i connettori dell'acqua, nonché il tappo, la catenella e il gruppo dell'anello d'ancoraggio.



4. LO SAPEVATE CHE...

1. L'uso della fascia ThermoWrap **NON** sostituisce le linee guida di prassi comune per prevenire le lesioni da pressione. Continuare a utilizzare misure preventive standard per le lesioni da pressione quando si utilizza la fascia ThermoWrap.
2. La fascia ThermoWrap **NON** deve essere utilizzata come strumento per sollevare o spostare il paziente.
3. Evitare l'accumulo di fluidi tra la cute e la fascia ThermoWrap.